

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
Dr. Senst


Model No. YS35



**TRAGBARER DAMPFVERNEBLER
MIT MESH-TECHNOLOGIE**

GEBRAUCHSANLEITUNG DE



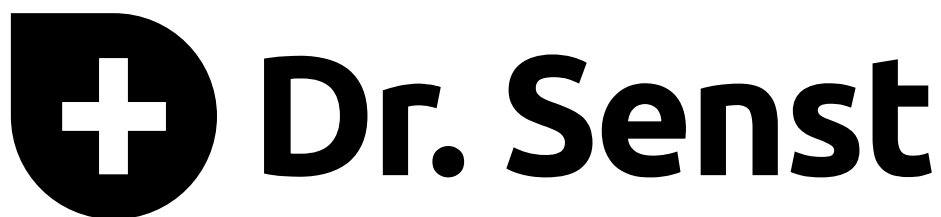

TRAGBARER DAMPFVERNEBLER MIT MESH-TECHNOLOGIE

INHALTSVERZEICHNIS

- 3** _ Zeichenerklärung
- 4** _ Sicherheitshinweise
- 5** _ Hinweise zum Umgang mit Batterien
- 5** _ Hinweise zur elektromagnetischen Verträglichkeit
- 6** _ Lieferumfang
- 7** _ Beschreibung des Geräts
- 8** _ Vorbereitung des Geräts
- 9** _ Gebrauchsanleitung
- 12** _ Batteriewechsel
- 12** _ Aufbewahrung und Pflege
- 14** _ Entsorgung
- 14** _ Kundendienst und Garantie
- 15** _ Fehlerbehebung
- 16** _ Angaben zum Produkt

ZEICHENERKLÄRUNG

Folgende Symbole werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Gerät und auf der Verpackung verwendet.



Achtung – Warnung vor Verletzungsgefahr oder Gesundheitsrisiken.



Hinweis – Hinweis auf wichtige Informationen.



Anwendungsteil Typ BF auf Grundlage der Sicherheitsklasse für die direkte und indirekte Anwendung.



Seriennummer.



Gebrauchsanleitung einhalten.



Recyclbares, aus erneuerbaren Rohstoffen hergestelltes Verpackungsmaterial.




leere Batterien und entsorgen diese jeweils an geeigneten Sammelstellen entsprechend der nationalen Vorschriften. Siehe auch die Batteriesicherheitshinweise.



CE-Kennzeichnung zur Bescheinigung der Konformität mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie für Medizinprodukte.

IP22

IP22 Schutzart der Verpackungen für elektrische Geräte, wobei die erste Kennziffer den Schutz gegen Fremdkörper (von 0 bis 6) angibt, die zweite Kennziffer den Schutz gegen Flüssigkeiten (von 0 bis 8).

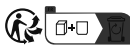

Trimann Recycling. Gemäß dem französischen Dekret Nr. 2014-1577. Das Symbol zeigt das Recycling von Verpackungen nach Kategorien an.




Trimann Recycling. Info-Tri für die ordnungsgemäße Entsorgung von elektronischen Geräten, Batterien und beiliegenden Peripheriegeräten in Frankreich.



Trocken lagern und vor Feuchtigkeit schützen



Vor Sonneneinstrahlung schützen

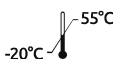

Temperaturgrenze für die Lagerung und den Transport: -20°C bis 55°C



SICHERHEITSHINWEISE



Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch, insbesondere die Sicherheitshinweise, und halten Sie sie ein. Diese Anleitung gilt als Teil des Produkts und muss während seines gesamten Lebenszyklus aufbewahrt werden. Händigen Sie das Gerät anderen Personen bitte nur zusammen mit der vorliegenden Dokumentation aus. Setzen Sie sich im Falle eines Verlustes dieser Anleitung und Fragen oder Zweifeln bitte mit GBT GmbH in Verbindung (die Kontaktangaben sind auf der letzten Seite dieses Dokuments aufgeführt).

- Bitte prüfen Sie vor der Verwendung des Produkts, dass dieses intakt ist und keine sichtbaren Schäden aufweist. Verwenden Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht und setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.
- Das Gerät ist nur für den bei seiner Entwicklung vorgesehenen und in dieser Gebrauchsanleitung angegebenen Zweck bestimmt. Jede Verwendung, die vom angegebenen Bestimmungszweck abweicht, wird als missbräuchlich und potenziell gefährlich erachtet.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf einem unsachgemäßen oder falschen Gebrauch beruhen.
- Das in dieser Anleitung aufgeführte Zubehör ist spezifisch für dieses Gerät vorgesehen.
- Das Produkt ist nur für den menschlichen Gebrauch bestimmt.
- Der Dampfvernebler ist ein Medizinprodukt. Halten Sie sich in Bezug auf die Art und Dosierung des Arzneimittels an die Anweisungen Ihres Arztes.
- Das Gerät arbeitet jeweils für 10–20 Minuten mit einem Arzneimittelverbrauch von 2–4 ml und darf nur laut den ärztlichen Anweisungen zum Einsatz kommen.
- Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Kindern aufbewahren. Kinder dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Schalten Sie das Gerät im Falle einer Störung und/oder einer Fehlfunktion aus, ohne weitere Schritte zu unternehmen. Wenden Sie sich für Reparaturen bitte immer an Ihren Händler. Die Komponenten dieses Geräts NICHT eigenhändig ausbauen, reparieren oder ersetzen.
- Gehen Sie sorgfältig mit diesem Gerät um und schützen Sie es gegen Stöße, große Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen, Staub, direkte Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Schütteln Sie das Gerät NICHT während des Gebrauchs.
- VERHINDERN SIE, dass Flüssigkeiten in den Gerätekörper gelangen. Das Gerät daher niemals in Wasser eintauchen oder unter fließendem Wasser spülen. Dieses Gerät ist nicht wasserdicht.
- Der Arzneimittelbehälter darf im Falle einer Beförderung oder Nichtverwendung kein Arzneimittel oder destilliertes Wasser enthalten, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an einem feuchten Ort auf und verwenden Sie es innerhalb der Temperatur- und Feuchtigkeitsgrenzen laut Abschnitt „Angaben zum Produkt“.



HINWEISE ZUM UMGANG MIT BATTERIEN

- Nehmen Sie die Batterien bei längerer Nichtbenutzung des Geräts aus dem Batteriefach und bewahren Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort bei Raumtemperatur auf.
- Batterien NICHT aufladen, wenn sie dafür nicht vorgesehen sind.
- Laden Sie aufladefähige Batterien NUR entsprechend den Anweisungen der mitgelieferten Anleitung auf und verwenden Sie dabei nur Geräte, die in den Unterlagen des Batterieherstellers aufgeführt sind.
- Schützen Sie die Batterien vor übermäßiger Wärme und direktem Sonnenlicht. Andernfalls können sie beschädigt werden und/oder explodieren.
- Batterien NICHT ins Feuer werfen. **Explosionsgefahr!**
- Verwenden Sie immer denselben Batterietyp und ersetzen Sie alle Batterien stets gemeinsam.
- Das Entfernen oder Ersetzen von Batterien muss von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren: Kinder könnten Batterien verschlucken und daran ersticken. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.
- Die in den Batterien enthaltene Säure ist korrosiv. Den Kontakt mit der Haut, den Augen und der Bekleidung vermeiden. Kommt Batterieflüssigkeit mit der Haut und den Augen in Kontakt, die betroffenen Stellen mit viel Wasser ausspülen und sofort einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, Schutzhandschuhe anziehen und das Batteriefach mit einem trockenen Tuch reinigen. Die zur Reinigung verwendeten Materialien ordnungsgemäß entsorgen.



HINWEISE ZUR ELEKTROMAGNETISCHEN VERTRÄGLICHKEIT

- Das Gerät eignet sich für den Einsatz in den Umgebungen laut der vorliegenden Gebrauchsanleitungen, einschließlich private Haushalte.
- Unter bestimmten Umständen darf das Gerät bei starken elektromagnetischen Störungen nur eingeschränkt zum Einsatz kommen.
- Dieses Gerät nicht in unmittelbarer Nähe anderer elektrischer Geräte verwenden, denn dies könnte zu Fehlfunktionen führen.
- Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann die Leistung des Geräts und seine Lebensdauer beeinträchtigen.
- Mobiltelefone oder Einrichtungen, die magnetische Felder erzeugen, sollten in der Nähe des Geräts nicht verwendet werden.
- Das Produkt NICHT in einer Umgebung verwenden, die starken elektromagnetischen Störungen ausgesetzt ist.
- Einen Abstand von mindestens 3,5 Metern zwischen dem Gerät und anderen Elektroprodukten mit einem Energieverbrauch von über 2 W einhalten, um elektromagnetische Störungen zu vermeiden.

Weitere quantitative Daten zur elektromagnetischen Verträglichkeit sind bei GBT GmbH und auf Anfrage erhältlich.

LIEFERUMFANG

- Hauptgerät
- Arzneimittelbehälter
- Zubehör (Maske für Kinder, Maske für Erwachsene, Mundstück)
- Gummiband-Fixierung für Masken
- Aufbewahrungsbox zum Mitnehmen des Geräts
- USB-Kabel
- Die vorliegende Gebrauchsanleitung
- 2x AA-Batterien (Alkaline)

Gerätefunktionen

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der Norm IEC 60601-1-11 und ist für die Behandlung von Atemwegserkrankungen wie Erkältung, Fieber, Bronchitis, Asthma, Lungenentzündung, Lungenmykose und Lungenherzerkrankungen sowie zur Vorbeugung von Atemwegsinfektionen vorgesehen. Die richtige Therapie darf nur von einem Arzt verschrieben werden.

Dank der Technologie dieses Geräts werden die Inhalationspräparate durch die Schwingung eines darin enthaltenen piezoelektrischen Kristalls in feinste Tröpfchen zerteilt, die tief in die Atemwege eindringen und die Wirkstoffe dadurch gezielt zur richtigen Stellen transportieren.

Die Vernebelungsgeschwindigkeit ist so konzipiert, dass eine maximale Wirksamkeit der Behandlung sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern gewährleistet ist.

Merkmale des Geräts

- Problemloses mitnehmen, hocheffiziente Vernebelung.
- Geräuscharme Vernebelung (unter 50 dB).
- Fein zerstäubte Partikel.
- Mit Füllstandsensoren, der das Gerät stoppt, wenn der Arzneimittelbehälter leer ist.
- Doppelte Stromversorgung: über Batterien (im Lieferumfang enthalten) oder USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten).

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

Abb. 1 : Arzneimittelbehälter

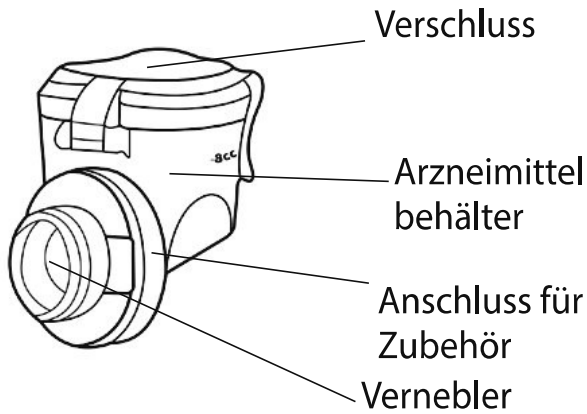


Abb. 3: Hauptgerät, Ansicht von hinten

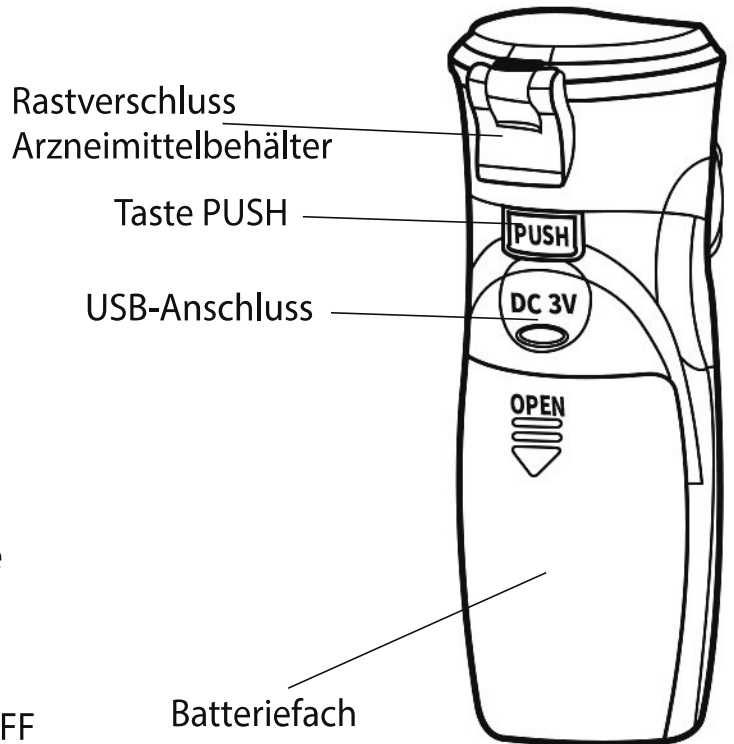


Abb. 2: Hauptgerät, Ansicht von vorne


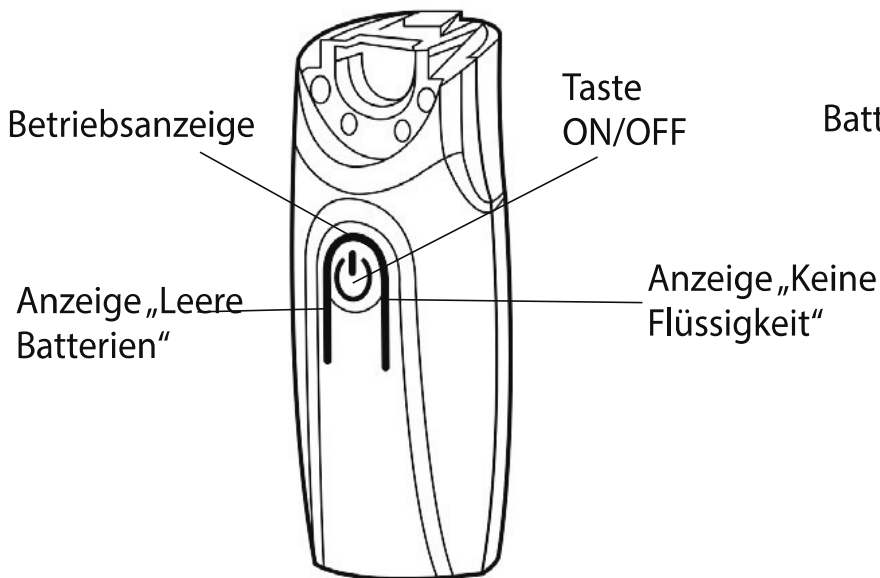



Abb. 4: Zubehör




Maske für Erwachsene

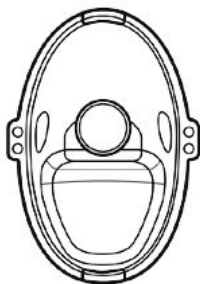

Maske für Kinder

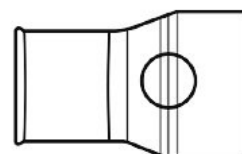

Mundstück

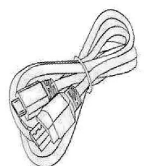

USB-Kabel

VORBEREITUNG DES GERÄTS


Dieser Vernebler kann entweder durch zwei austauschbare Alkali-Batterien Typ AA (im Lieferumfang enthalten) oder durch ein USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) betrieben werden, das an ein Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) angeschlossen wird. Das Netzteil muss die folgenden Parameter erfüllen:

- Eingangsspannung: AC 100–240 V, 50/60 Hz
- Ausgangsspannung: DC 3–5 V, 1–2 A
- Das Gerät nicht gleichzeitig mit Batterien und USB-Kabel versorgen bzw. nur eine Option wählen.

1) Verwendung mit Batterien

- Öffnen Sie das Batteriefach durch Druck auf den Deckel (Abb. 5).
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polaritätskennzeichen ein.
- Schließen Sie das Fach.

Abb. 5

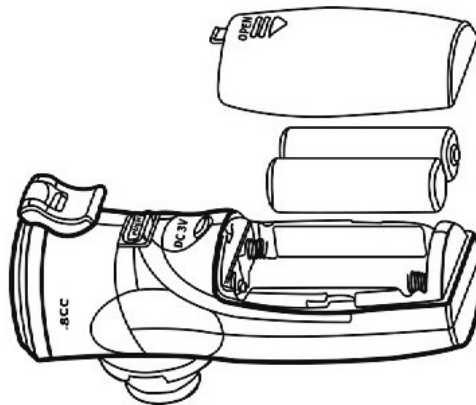

2) Verwendung mit dem mitgelieferten USB-Kabel

Das Gerät kann wahlweise mit einem USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) oder Batterien betrieben werden.

- Entnehmen Sie die Batterien.
- Schließen Sie das Kabel an die Steckdose an.
- Schließen Sie das Kabel an das Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) an.


Hinweis: Sicherstellen, dass der Ausgang des Netzteils mit der erforderlichen AC-Spannungsversorgung des Geräts übereinstimmt. Zur Gewährleistung der Sicherheit ein Netzteil verwenden, das den Anforderungen der Norm für Medizinische elektrische Geräte IEC 60601-1 nachkommt.

3) Montage des Verneblers

Aus hygienischen Gründen ist es notwendig, den Vernebler und das Zubehör vor und nach jedem Gebrauch zu reinigen und nach der letzten Behandlung des Tages zu desinfizieren (siehe Abschnitt „Instandhaltung und Aufbewahrung“).

Schieben Sie den Arzneimittelbehälter in das Hauptgerät, bis er hörbar (Abb.6).

Abb. 6

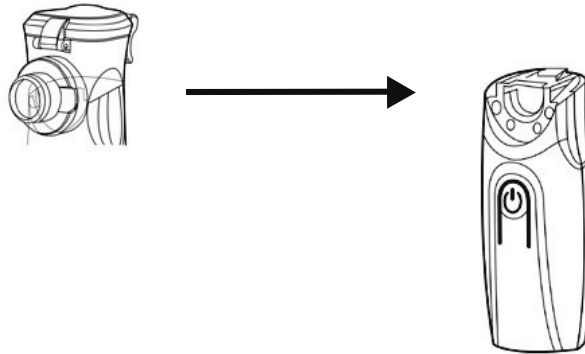

GEBRAUCHSANLEITUNG

1) Befüllen des Behälters

- Halten Sie das Hauptgerät in einer Hand und öffnen Sie mit der anderen den Arzneimittelbehälter, indem Sie den Rastverschluss entsperren.
- Geben Sie das Arzneimittel in den Behälter (Abb. 7).
- Die Füllmenge im Behälter darf nicht weniger als 0,5 ml und nicht mehr als 8 ml betragen.

Abb. 7




2) Behälter schließen

- Den Arzneimittelbehälter schließen und den Rastverschluss befestigen.
- Den Vernebler nicht schütteln oder umdrehen: Das Arzneimittel kann dadurch auslaufen

3) Zubehör anschließen

- Schließen Sie das gewünschte Zubehör an das Gerät an: Mundstück zur Behandlung des Rachenraums, Maske für Kinder/Erwachsene zur Behandlung über die Nasenhöhle oder den Rachenraum (Abb. 8).
- Führen Sie das Gerät zum Mund und umschließen Sie das Mundstück fest mit den Lippen. Wenn Sie die Maske verwenden, setzen Sie sie über Nase und Mund an, ohne die Augen zu bedecken.
- Starten Sie das Gerät durch Drücken der Taste START/STOP.
Der korrekte Betrieb wird durch die Abgabe des Sprühnebels und das Aufleuchten der blauen Betriebsanzeige angezeigt.

Abb. 8

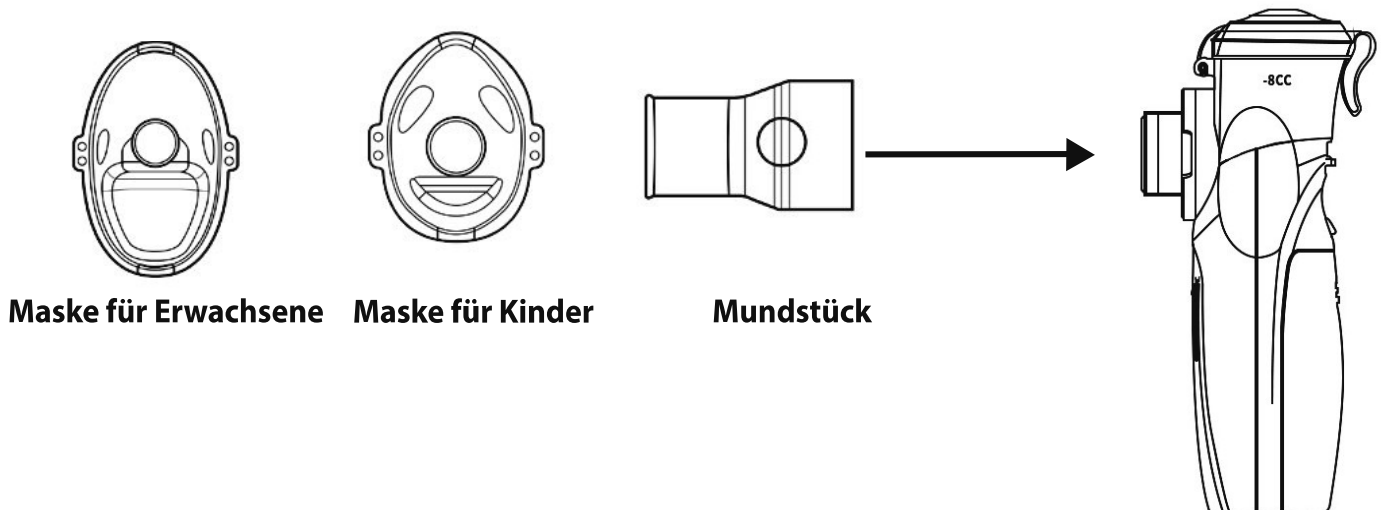

4) Hinweise zur korrekten Inhalation

- Für eine wirksame Behandlung ist es von Vorteil, wenn Sie ruhig und entspannt sitzen, indem Sie den Vernebler in der Hand halten.
- Damit die Partikel optimal verteilt werden können, sollten Sie langsam und tief einatmen.
- Wenn Sie das Mundstück verwenden, bringen Sie das flache Ende mit leicht geschlossenen Lippen zum Mund, damit das Arzneimittel zur betroffenen Stelle gelangen kann.
- Wenn Sie die Maske verwenden, legen Sie die Maske am Gesicht an, bis sie Nase und Mund bedeckt. Behandlung über die Nasenhöhle: Atmen Sie durch die Nase ein und durch den Mund aus. Behandlung über den Rachen: Atmen Sie durch den Mund ein und durch die Nase aus.



- **Geben Sie die nach der Montage und vor dem Gebrauch physiologische Kochsalzlösung oder entionisiertes Wasser in den Arzneimittelbehälter und drücken Sie die Taste START/STOP, um die Funktionstüchtigkeit zu prüfen.**
- **Verwenden Sie das Mundstück korrekt, richten Sie die Flüssigkeit niemals auf die Zunge.**
- **Nehmen Sie keine Flüssigkeiten ein und achten Sie darauf, dass die Lösung nur die betroffene Stelle erreicht.**
- **Atmen Sie regelmäßig und ohne ruckartigen Bewegungen, um etwaige Verstopfungen zu vermeiden. In diesem Fall schaltet die Niederspannungsanzeige (rot) auf Blinklicht und deaktiviert sich danach automatisch.**
- **Der Vernebler ist nur funktionstüchtig, wenn der Arzneimittelbehälter Flüssigkeit enthält.**
- **Neigen Sie das Hauptgerät leicht zu sich selbst, um die vibrierende Membran in das Arzneimittel zu tauchen. Das Gerät ist nicht funktionstüchtig, wenn die vibrierende Membran nicht in das Arzneimittel getaucht ist.**
- **Reicht die Menge des Arzneimittels nicht aus, neigen Sie das Gerät von der START/STOPP-Seite aus zu sich selbst, sodass das Arzneimittel, das sich an der Membran angesammelt hat, vollständig aufgebraucht werden kann.**
- **Setzen Sie das Gerät keinen Stößen aus, um eine Beschädigung der Membran zu vermeiden.**
- **Wenn die Niederspannungsanzeige (rot) auf langsames Blinklicht schaltet, bedeutet dies, dass die Batterien bald leer sind. Ersetzen Sie sie in diesem Fall durch neue Batterien oder schließen Sie das Gerät alternativ an das Netzteil an.**
- **Das Gerät während des Gebrauchs nicht heftig schütteln, da es sich sonst automatisch ausschaltet.**
- **Es wird dringend davon abgeraten, kalkhaltiges Wasser zu verwenden, um das Gerät nicht zu beschädigen.**


5) Beenden der Inhalation

- **Schalten Sie das Gerät am Ende der Behandlung mit der Taste ON/OFF aus. Die Betriebsanzeige (blau) schaltet sich aus.**
- **Das Gerät ist mit einem Füllstandsensoren ausgestattet, der das Gerät stoppt, wenn der Arzneimittelbehälter leer ist. Aus technischen Gründen befindet sich im Behälter noch ein kleiner Produktrückstand, der am Ende der Behandlung entfernt werden muss.**
- **Wenn Sie ein tragbares Batterieladegerät verwenden, ziehen Sie nach dem Gebrauch des Geräts den Netzstecker aus der Steckdose. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass sich während des Gebrauchs keine Batterien im Gerät befinden.**

Zerlegen des Geräts

- Entfernen Sie das Mundstück oder die Maske.
- Halten Sie das Hauptgerät mit einer Hand und drücken Sie die Taste PUSH auf der Rückseite des Hauptgeräts (Abb. 9).
- Halten Sie den Flüssigkeitsbehälter mit der anderen Hand, und schieben Sie den Behälter vom Behältersitz nach vorne.
- Öffnen Sie den Behälter, gießen Sie alle Rückstände ab und reinigen Sie das Gerät. Lassen Sie die Komponenten an der Luft trocknen und bewahren Sie das Gerät an einem sauberen, belüfteten und trockenen Ort auf (siehe Abschnitt „Aufbewahrung und Pflege“).

Abb. 9

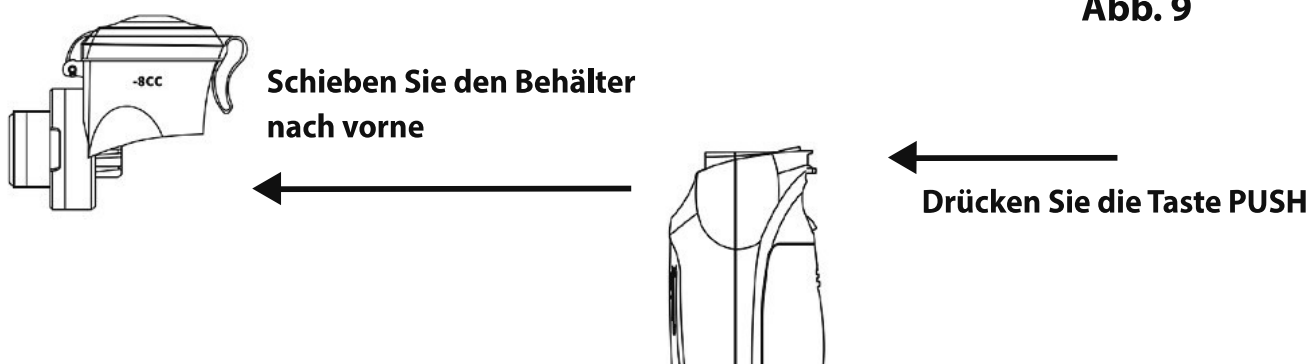

BATTERIEWECHSEL

1. Das Batteriefach wie in Abb. 5 gezeigt öffnen.
2. Die leeren Batterien entnehmen und gemäß den vor Ort geltenden Vorschriften entsorgen.
3. Batterien desselben Typs und derselben Nutzungsdauer unter Beachtung des Polaritätskennzeichens einlegen.
4. Das Batteriefach schließen.

AUFBEWAHRUNG UND PFLEGE



Um den korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten, ist es wichtig, dass die nachfolgend beschriebenen Reinigungsvorgänge sorgfältig eingehalten werden. Es kann andernfalls sein, dass das Gerät bei der darauf folgenden Anwendung das Arzneimittel gar nicht, sehr langsam oder mit einer unkorrekten Geschwindigkeit abgibt. Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch immer aus.

Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch immer aus.

Entsorgen Sie nach jedem Gebrauch zunächst die Arzneimittelrückstände. Entfernen Sie danach das Zubehör vom Hauptgerät, um es gründlich zu reinigen. Trocknen Sie die Komponenten unmittelbar nach der Reinigung. Das Hauptgerät nicht wegräumen, wenn das Hauptgerät, der Arzneimittelbehälter oder anderes Zubehör nass oder feucht sind.

Reinigung und Desinfektion des Arzneimittelbehälters

- Öffnen Sie den Behälter und entsorgen Sie etwaige Rückstände.
- Gießen Sie eine kleine Menge heißes, destilliertes Wasser (30–60 °C) in den Behälter und schließen Sie den Behälter.
- Drücken Sie die Taste START/STOP für 5 Sekunden. Die Betriebsanzeige (blau), die Füllstandsanzeige (gelb) und die Niederspannungsanzeige (rot) schalten auf Dauerlicht.
- Schalten Sie das Gerät im Reinigungsmodus ein, um das destillierte Wasser 1–2 Minuten lang zu versprühen und dadurch auch die Arzneimittelrückstände zu entfernen.
- Spülen Sie den Behälter und den Verschluss mit destilliertem Wasser aus. Entfernen Sie überschüssiges Wasser vorsichtig mit einem weichen, sauberen Tuch oder lassen Sie die Teile in einer sauberen Umgebung an der Luft trocknen.
- Tauchen Sie den Arzneimittelbehälter mindestens 3 Minuten lang in 75%igen medizinischen Alkohol. Lassen Sie ihn danach trocknen, bevor Sie ihn an einem sauberen Ort aufbewahren.



• **Verwenden Sie zur Reinigung und Desinfektion Verbandmull und Watte-
stäbchen.**

• **Wischen Sie den Behälter nicht mit Papier oder anderen Hilfsmitteln ab, denn dies könnte den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts beeinträchtigen.**

• **Reinigen Sie den Behälter nicht mit scharfen Gegenständen und vermeiden Sie jegliche Berührung mit der Membran.**

• **Verwenden Sie zur Reinigung keine Bleichmittel für den Hausgebrauch oder andere aggressive Substanzen, nur die oben genannte Lösung.**

Reinigung und Desinfektion des Hauptgeräts

• Reinigen Sie das Hauptgerät vorsichtig mit 75%igem medizinischem Alkohol und entfernen Sie überschüssiges Wasser mit einem weichen, sauberen Tuch. Reinigen Sie auf diese Weise auch die Elektroden, die das Hauptgerät und den Arzneimittelbehälter verbinden.



• **Reinigen Sie das Hauptgerät nicht mit flüchtigen oder aggressiven Flüssigkeiten wie Benzol oder Verdünner.**

• **Das Hauptgerät weder abspülen noch in eine Flüssigkeit tauchen.**

Reinigung und Desinfektion des Mundstücks und der Masken

- Entfernen Sie das Mundstück oder die Maske.
- Spülen Sie das Mundstück und die Maske 2–3 Minuten lang mit reinem demineralisiertem Wasser (Wassertemperatur ≤ 50 °C).
- Trocknen Sie sie mit Verbandmull ab.
- Reinigen Sie die Maske und das Mundstück mindestens 3 Minuten lang mit 75%igem medizinischem Alkohol. Lassen Sie sie danach an der Luft trocknen.
- Es wird empfohlen, das Gerät bei Nichtverwendung in der mitgelieferten Aufbewahrungsbox aufzubewahren.

ENTSORGUNG



Die Produktverpackung ist aus recycelten Materialien hergestellt und muss gemäß den örtlichen Umweltschutzvorschriften entsorgt werden.



Aus Gründen des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung muss bei den entsprechenden Sammelstellen unter Einhaltung der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die für die Entsorgung zuständige Stelle vor Ort.

KUNDENDIENST UND GARANTIE

Dieses Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt und darf nicht für professionelle Zwecke verwendet werden.

- Das Gerät hat eine Garantie von 2 Jahren ab Datum des Kaufs, der durch einen Kaufbeleg nachgewiesen werden muss. Dieser Zeitraum entspricht der geltenden Gesetzgebung („Verbraucherkodex“ Gesetzesdekret Nr. 206 vom 06.09.2005) und kommt nur zur Anwendung, wenn der Verbraucher eine Privatperson ist.
- Die Garantie beschränkt sich auf Herstellungsfehler und ist nicht gültig, wenn der Schaden durch ein zufälliges Ereignis, Fahrlässigkeit oder einen unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurde.
- Das Gerät aus keinem Grund öffnen. Der Garantieanspruch erlischt im Falle eines Öffnens oder einer Manipulation.
- Die Garantie hat eine Laufzeit von 2 Jahren. Danach ist die technische Unterstützung kostenpflichtig. Informationen über technische Unterstützung, ob unter Garantie oder gegen Bezahlung, können bei GBT GmbH unter der hier auf der letzten Seite angegebenen Adresse eingeholt werden.
- Reparaturen und der Ersatz von Produkten unter Garantie werden kostenlos durchgeführt. Bei Fehlern wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Senden Sie das Produkt NICHT direkt an GBT GmbH, **sondern schreiben Sie im Vorfeld eine E-Mail an: info@dr-senst.com**. Alle Garantieansprüche (einschließlich Ersatz des Produkts oder eines Teils davon) verlängern nicht die ursprüngliche Garantiezeit des ersetzten Produkts.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt an Personen, Gegenständen oder Haustieren durch die auch teilweise Nichteinhaltung der Anweisungen dieser Gebrauchsanleitung verursacht werden, insbesondere der Warnhinweise zur Installation, Verwendung und Wartung des Geräts.
- GBT GmbH ist ständig bemüht, seine Produkte zu optimieren. Das Unternehmen behält sich daher das Recht vor, seine Produkte ohne vorherige Ankündigung ganz oder teilweise entsprechend den Produktionsanforderungen zu ändern, ohne dass GBT GmbH oder seine Wiederverkäufer dafür haftbar gemacht werden können.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn Sie bei der Verwendung des Geräts auf Probleme stoßen, überprüfen Sie bitte zunächst die folgenden Punkte.

Problem	Possible causes	Solution
Das Gerät ist eingeschaltet, gibt jedoch wenig Nebel ab.	Der Arzneimittelbehälter ist nicht korrekt montiert.	Sicherstellen, dass der Arzneimittelbehälter korrekt montiert ist.
	Der Arzneimittelbehälter ist nicht sauber.	Behälter reinigen.
	Unzureichende Arzneimittelmenge.	Versuchen, das Hauptgerät leicht zu sich selbst zu neigen oder Flüssigkeit hinzuzufügen.
Die Betriebsanzeige blinkt 1 Sekunde lang und schaltet sich dann aus.	Der Arzneimittelbehälter ist nicht korrekt montiert.	Sicherstellen, dass der Arzneimittelbehälter korrekt montiert ist.
	Der Behälter enthält kein Arzneimittel.	Den Arzneimittelbehälter mit der entsprechenden Arzneimittelmenge füllen.
	Der Arzneimittelbehälter ist nicht sauber.	Behälter reinigen.
	Unzureichende Arzneimittelmenge.	Versuchen, das Hauptgerät leicht zu sich selbst zu neigen oder Flüssigkeit hinzuzufügen.
Die Betriebsanzeige schaltet sich nicht ein und das Gerät gibt keinen Nebel ab.	Die Batterien sind nicht richtig eingesetzt.	Sicherstellen, dass die Batterien richtig eingesetzt sind.
	Leere Batterien.	Batterien ersetzen oder das mitgelieferte USB-Kabel verwenden.
Das Gerät schaltet sich einige Sekunden nach dem Einschalten aus.	Unzureichende Arzneimittelmenge.	Versuchen, das Hauptgerät leicht zu sich selbst zu neigen oder Flüssigkeit hinzuzufügen.
	Der Arzneimittelbehälter ist nicht sauber.	Behälter reinigen.
Das Gerät schaltet sich während der Benutzung automatisch aus.	Der Arzneimittelbehälter ist nicht korrekt montiert.	Sicherstellen, dass der Arzneimittelbehälter korrekt montiert ist und das Gerät einschalten.
	Kein Arzneimittel im Behälter.	Den Arzneimittelbehälter mit der entsprechenden Arzneimittelmenge füllen.
	Unzureichende Arzneimittelmenge.	Versuchen, das Hauptgerät leicht zu sich selbst zu neigen oder Flüssigkeit hinzuzufügen.
Das Arzneimittel ist fast aufgebraucht, das Gerät schaltet sich jedoch nicht automatisch aus.	Einige Medikamente können Schaum in der Arzneimittelbehälter erzeugen.	Die Taste START/STOP drücken, um das Gerät auszuschalten und den Schaum zu entfernen.
	Der Arzneimittelbehälter ist nicht sauber.	Behälter reinigen.
Der Arzneimittelbehälter ist undicht.	Die Arzneimittelbehälter ist beschädigt.	Den beschädigten Arzneimittelbehälter ersetzen, bevor das Gerät wiederverwendet wird.

ANGABEN ZUM PRODUKT

Produktbezeichnung: Tragbarer Dampfvernebler mit Mesh-Technologie

Abmessungen des Produkts: 45x63x123 mm

Gewicht: ca. 79 g (ohne Batterien)

Fassungsvermögen Behälter: max. 8 ml

Durchschnittliche Größe der zerstäubten Partikel: MMAD $5\mu\text{m} \pm 25\%$

Arzneimittelfluss: $\geq 0,2$ ml/min

Schwingfrequenz: 120 kHz $\pm 10\%$

Geräuschpegel: ≤ 50 dB

Betriebsbedingungen:

- **Temperatur:** $10,0$ °C – $40,0$ °C
- **Maximale relative Feuchtigkeit:** $\leq 80\%$ RH
- **Atmosphärischer Druck:** 86 kPa – 106 kPa

Aufbewahrungs- und Transportumgebung:

- **Temperatur:** -20 °C – 55 °C
- **Maximale relative Feuchtigkeit:** $\leq 80\%$ RH
- **Atmosphärischer Druck:** $70,0$ – $106,0$ kPa



Changzhou Zhengyuan Medical Technology Co., Ltd.
Northeast 3/4/5 Floor, C1 Block, No.9 Changyang
Road, West Taihu Lake, International
Medical Industrial Park, 213145, Changzhou, Jiangsu,
P. R. China
Tel: 86-519-85257899 Fax: 86-519-83607899



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg Germany
Tel: 0049-40-2513175 Fax: 0049-40-255726